



体外診断用医薬品

\*クラスⅢ免疫組織学検査用シリーズ  
**ヒストファイン SAB-PO(M) キット**  
(シリーズ共用試薬)

## ブロッキング試薬Ⅱ

10%ウサギ正常血清

包装： 50テスト(6mL)      Code：426051  
150テスト(17mL)      Code：426052

製造販売元

**株式会社ニチレイバイオサイエンス**

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL.03(3248)2208 FAX.03(3248)2243

\*■本品は、クラスⅢ免疫組織学検査用シリーズ ヒストファイン SAB-PO(M)キットの構成試薬 ブロッキング試薬Ⅱであり、補充用に使用するものである。

\*\*■本品を使用する際は、ヒストファイン SAB-PO(M)キットおよび各構成製品の第一抗体の添付文書をよく読んで使用すること。各構成製品名は末尾の記載を参照すること。

### 1. 内容

ブロッキング試薬Ⅱ・・・10%ウサギ正常血清。

液状。

0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS, pH7.4)にて、即時使用可能な血清濃度に希釈済み。

1バイアル中に6mLまたは17mLを含む。

### 2. 使用方法

スライド上の組織切片が完全に覆われるようにブロッキング試薬Ⅱを1-2滴(50-100 $\mu$ L)滴下し、常温(15-25 $^{\circ}$ C)で10分間反応させる。

### 3. 使用上又は取扱上の注意

ヒト由来の検体は、取扱者に感染をひき起こす危険性がある。従って、適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

### 4. 貯法

2-8 $^{\circ}$ Cで保存。

(ヒストファイン SAB-PO(M)キットの構成製品名) \*\*

デスミン、上皮膜抗原(EMA)、 $\alpha$ -フェトプロテイン(AFP)、グリア線維性酸性プロテイン(GFAP)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン $\beta$ サブユニット(HCG- $\beta$ )、ケラチン/サイトケラチン、白血球共通抗原(LCA)、前立腺特異抗原(PSA)、ビメンチン