

体外診断用医薬品

ALK融合タンパクキット
ヒストファイン ALK iAEP® キット

ALKコントロールスライド

包装 : 5 スライド

Code : 427081

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402
東京都中央区築地 6-19-20
TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

*■本品は、ヒストファイン ALK iAEP® キット 用手法用(Code : 427071)、ヒストファイン ALK iAEP® キット ヒストステイナー用(Code : 727071)、またはヒストファイン ALK iAEP® キット AT用 (Code : AT2707-1)と組み合わせて使用すること。

■本品を使用する際は、ヒストファイン ALK iAEP® キットの添付文書をよく読んで使用すること。

1. 内容

ホルマリン固定パラフィン包埋細胞株 2種類を貼付したスライド

- ・陽性コントロール細胞株/NCI-H2228 (スコア3相当)
- ・陰性コントロール細胞株/SK-BR-3 (スコア0相当) / スライド

2. 使用目的

- 1) 組織、細胞中の ALK 融合タンパクの発現の基準となる陽性組織ブロックを選定するためのコントロール (染色強度や非特異染色の確認)として使用。
- 2) 免疫組織(細胞)化学染色法を施行する際の、染色手技、技術および操作法の確認用に使用。

3. 使用方法

免疫組織化学染色を行う。

4. 染色性

細胞株	染色パターン
NCI-H2228	細胞の細胞質に強い陽性反応を示す。
SK-BR-3	すべての細胞に陽性反応を示さない。

以上の染色結果が得られない場合には、再度、別のスライドにて染色を行うこと。

*5. 貯法および使用上の注意

1. 2-8℃保存。
2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
3. 使用前に室温に戻すこと。
4. 細胞保護のため、スライド上のパラフィン切片部分に保護シールを貼付している。保護シールを剥がしてから使用すること。

※細胞剥離防止のためシールはゆっくり剥がすこと。

*6. 取扱上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎたコントロールスライドは使用しないこと。
2. ヒト由来の検体は、取扱者に感染をひき起こす危険性がある。従って、適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。