

体外診断用医薬品

承認番号：22300AMX00503000

ご使用前に必ず電子添文をお読みください。




A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

イムノファイン™ ストレップA


【操作方法】 テストプレート、試薬A入りスクイズチューブ、試薬Bは15～30℃に戻してからご使用ください。

■ 検体の調製

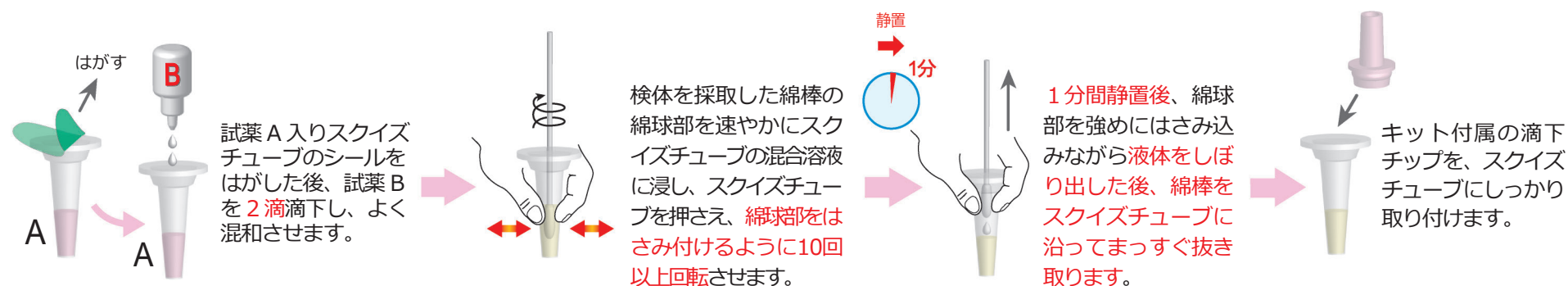

■ 測定


スクイズチューブの検体抽出液を、テストプレートの検体滴下部に2滴、滴下します。滴下チップが検体滴下部に触れないように、垂直に滴下してください。

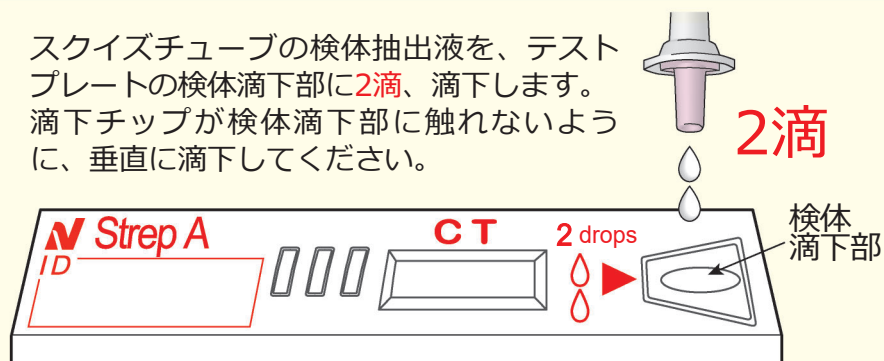

1 - 5 分後、判定部 T、C のラインの出現の有無を目視にて確認してください。

注) 10 分を超えて判定をしないでください。

■ 判定

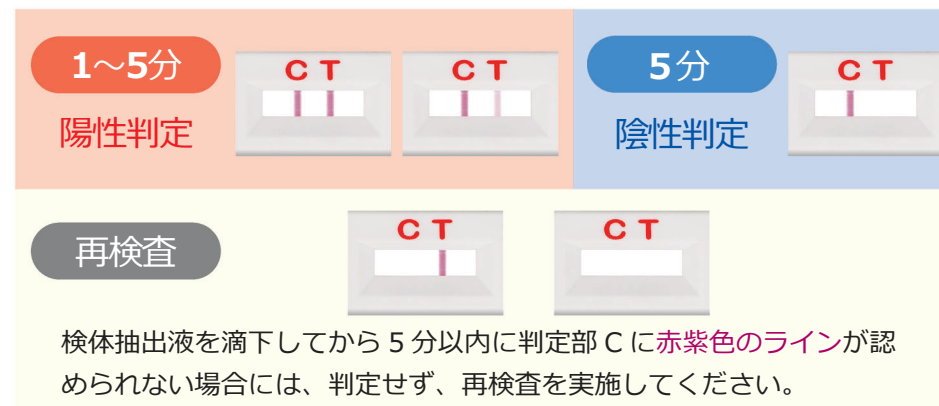

【検体の採取方法】

咽頭ぬぐい液




キット付属の滅菌綿棒を使用し、咽頭後部、扁桃、その他炎症部分を擦って咽頭粘液を採取します。

多量の粘液（唾液、鼻汁など）が検体に含まれると、反応に悪影響を与え、正しい判定結果が得られない原因となることがあります。

多量の粘液の採取を避けるため、綿球が舌、頬の表面、歯、歯肉に触れないように充分注意してください。

出典：イムノファイン™ ストレップA 電子添文より

製造販売元  株式会社ニチレイバイオサイエンス
〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

【問い合わせ先】株式会社ニチレイバイオサイエンス
問い合わせフォーム：<https://nichireibiosciences.co.jp/contactlist/>
問い合わせ電話番号：03-3248-2228
問い合わせ受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
ホームページ：<https://nichireibiosciences.co.jp>