

体外診断用医薬品

承認番号：30300EZX00072000

ご使用の前に必ず電子添文をお読みください。




SARSコロナウイルス抗原キット

イムノファイン™ SARS-CoV-2

【操作方法】 テストプレートおよび抽出液入りスクイズチューブは15～30℃に戻してからご使用ください。

検体の調製方法

シールをはがします。

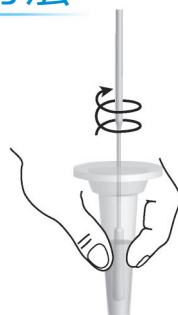

検体を採取した綿棒の綿球部を速やかに抽出液に浸し、スクイズチューブを押さえ、**綿球部をはさみ付けるように10回以上回転**させます。




綿球部を強めにはさみ込みながら液体をしぼり出した後、綿棒を**スクイズチューブに沿ってまっすぐ**抜き取ります。



キット付属のフィルターチップを、スクイズチューブにしっかり取り付けます。

測定法

スクイズチューブの検体抽出液を、テストプレートの検体滴下部に**3滴**、滴下します。フィルターチップが検体滴下部に触れないように、垂直に滴下してください。

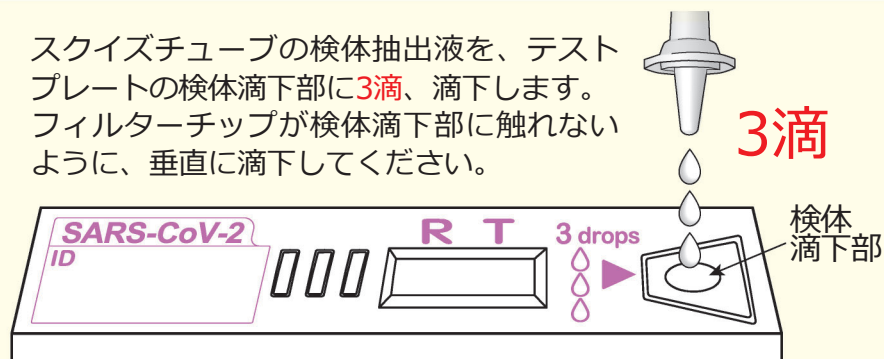

判定

～15分

陽性判定



15分

陰性判定



再検査



検体抽出液を滴下してから15分以内に判定部Rにラインが認められない場合は、再検査を実施してください。

※判定部R、Tのラインの出現の有無を目視にて確認してください。
詳細は、電子添文内の「測定結果の判定法」を参照してください。

【検体採取方法】

鼻咽頭ぬぐい液




キット付属の滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）を外鼻孔から鼻腔内にしっかり挿入し、鼻甲介を数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。
軸に力をかけて強く擦ったり、無理に回転させたりしないでください。
滅菌綿棒の先を鼻腔に無理にこすりつける必要はありません。

鼻腔ぬぐい液



キット付属の滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）を鼻腔に沿って2cm程度挿入し、ゆっくり5回程度回転させ5秒程度静置します。
患者自身が採取する場合は、鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療従事者の管理下で実施してください。

出典：イムノファイン™ SARS-CoV-2 電子添文より

製造販売元  **株式会社ニチレイバイオサイエンス**
〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

【問い合わせ先】株式会社ニチレイバイオサイエンス
問い合わせフォーム：<https://nichireibiosciences.co.jp/contactlist/>
問い合わせ電話番号：03-3248-2228
問い合わせ受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
ホームページ：<https://nichireibiosciences.co.jp>