


# 滅菌綿棒(鼻腔用・鼻咽頭用) 滅菌綿棒(咽頭用)

## 植毛綿棒で検体採取が容易

### 鼻腔用・鼻咽頭用



やわらかく、  
鼻咽頭まで  
入れやすい軸

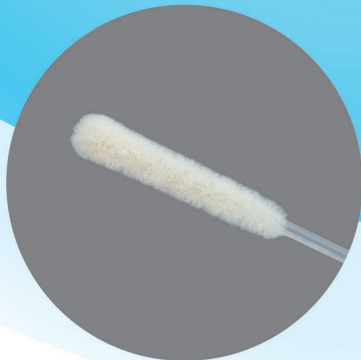

全長：151mm (持ち手太さ：2.5mm)

### 咽頭用



持ちやすく、  
しっかりした軸



全長：151mm (持ち手太さ：4.4mm)

## 検体の採取方法

### 鼻腔用・鼻咽頭用綿棒

### 鼻咽頭ぬぐい液



滅菌綿棒(鼻腔用・鼻咽頭用)を外鼻孔から鼻腔内にしっかり挿入し、鼻甲介を数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。軸に力をかけて強く擦ったり、無理に回転させたりしないでください。  
滅菌綿棒の先を鼻腔に無理にこすりつける必要はありません。

### 鼻腔用・鼻咽頭用綿棒

### 鼻腔ぬぐい液



滅菌綿棒(鼻腔用・鼻咽頭用)を鼻腔に沿って2cm程度挿入し、ゆっくり5回程度回転させ5秒程度静置します。  
患者自身が採取する場合は、鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療従事者の管理下で実施してください。

### 咽頭用綿棒

### 咽頭ぬぐい液





咽頭後部、扁桃、その他炎症部分を擦って咽頭粘液を採取します。滅菌綿棒(咽頭用)が舌、ほほ、歯に触れないように注意してください。

### 注意点

- ・採取量が少ない場合、または適切に検体が採取されていない場合には、正しい検査結果が得られない場合があります。
- ・採取量が多い場合には、展開不良や非特異反応などを起こす場合がありますので、過剰量の検体を除去してください。
- ・検体の調製および対象品<sup>※</sup>の操作方法については、対象品の添付文書をよくお読みの上、検査を実施してください。
- ・力まかせに強く擦ると、鼻の粘膜を傷つけることがあります。

## 製品内容

製品名称	滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）	滅菌綿棒（咽頭用）
商品コード	518022	518032
JANコード	4987780865332	4987780865325
サイズ	サイズ(外装) 長さ：203mm 幅：110mm 高さ：64.5mm サイズ(本体) 全長：151mm 軸の太さ(持ち手)：2.5mm	サイズ(外装) 長さ：203mm 幅：110mm 高さ：64.5mm サイズ(本体) 全長：151mm 軸の太さ(持ち手)：4.4mm
対象品	イムノファイン™ FLU II、イムノファイン™ SARS-CoV-2	イムノファイン™ FLU II、イムノファイン™ ストレップA
包装	50本	50本
貯法	2～30℃	2～30℃
備考	コパン FLOQSwabs（植毛スワブ）	コパン FLOQSwabs（植毛スワブ）
外装		

## 関連製品

商品コード	JANコード	分類	製品名称	包装
522111	4987780865936	SARSコロナウイルス抗原キット	イムノファイン™ SARS-CoV-2	10テスト
522101	4987780878554	インフルエンザウイルスキット	イムノファイン™ FLU II	10テスト
522071	4987780876598	A群ヘータ溶血連鎖球菌抗原キット	イムノファイン™ ストレップA	10テスト
NB-ICIC-525	4987780865479	SARSコロナウイルス抗原キット インフルエンザウイルスキット	COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」	20テスト
518012	4987780865318	-	鼻かみシート	50枚

製造販売元

 株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

学術問合せ

TEL. 03(3248)2228 FAX. 03(3248)2243