


ご使用前に必ず添付文書をお読みください。


COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」

【操作方法】 テストカセットおよび抽出液入りスクイズチューブは15~30℃に戻してからご使用ください。

検体の調製方法

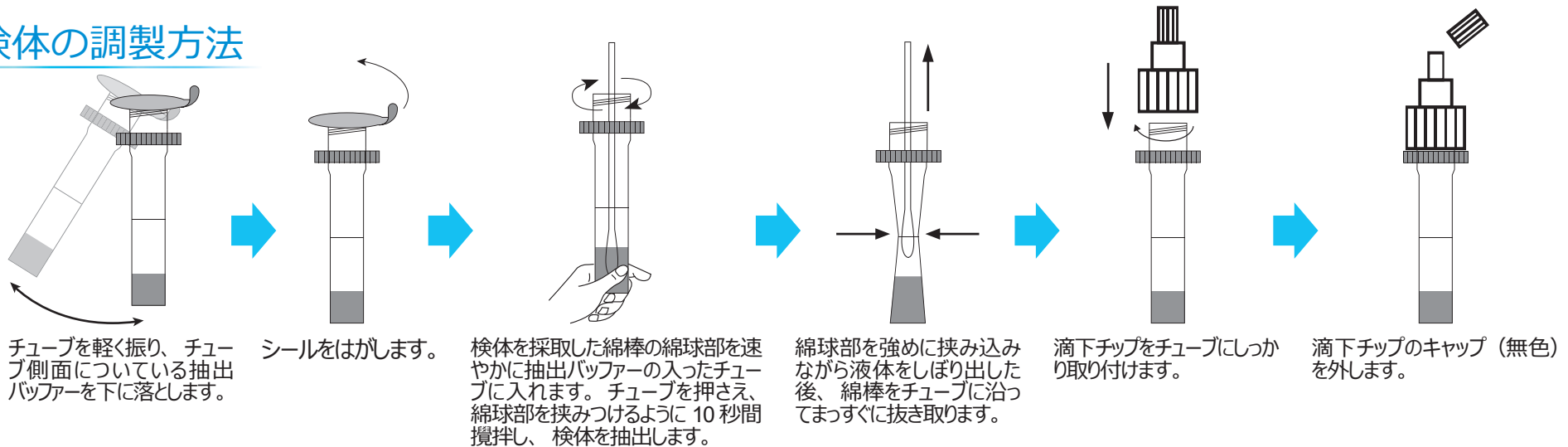

測定法

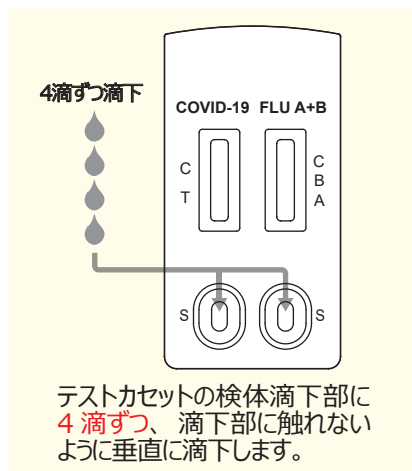

判定方法（判定時間15分）

陽性判定 滴下後~15分		陰性判定 15分		判定不可
【COVID-19 Test】 判定部 T と判定部 C に赤紫色のラインが認められた場合。	【FLU A+B Test】 判定部 A または判定部 B と判定部 C に赤紫色のラインが認められた場合。	【COVID-19 Test】 判定部 C に赤紫色のラインが認められ、判定部 T にラインが認められない場合。	【FLU A+B Test】 判定部 C に赤紫色のラインが認められ、判定部 A と判定部 B にラインが認められない場合。	検体抽出バッファーを滴下してから15分以内に判定部 C にラインが認められない場合、判定しないください。新しいテストカセットを用いて再検査してください。

※判定部 C、T、B、A のラインの出現の有無を目視にて確認してください。詳細は、添付文書内の「測定結果の判定法」を参照してください。

【検体採取方法】

鼻腔ぬぐい液



キット付属の滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）を鼻腔に沿って2cm程度挿入し、鼻甲介付近をゆっくり5回程度回転させてぬぐいます。5秒静置してから抜き取ります。

患者自身が採取する場合は鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療従事者の管理下で実施してください。

鼻咽頭ぬぐい液



キット付属の滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）を外鼻孔から鼻腔内にしっかり挿入し、鼻甲介を数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。

軸に力をかけて強く擦ったり、無理に回転させたりしないでください。

滅菌綿棒の先を鼻腔に無理にこすりつける必要はありません。

出典：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針_第4版」の「2.検体の種類と採取」をもとに作成

製造販売元
発売元
製造元



株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20 TEL. 03(3248)2228

杭州奥泰生物技术株式会社
(Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd)

【問い合わせ先】

株式会社ニチレイバイオサイエンス 迅速診断薬事業部

問い合わせフォーム：https://www.nichirei.co.jp/form/form_EIA

電話：03-3248-2228

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）